

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

1



- Применять препараты для дезинфекции инструментов занесенные в реестр VAH-/DGHM.

2



- Соблюдать инструкции производителя. Во время работы носить соответствующие защитные перчатки, -очки и одежду.

3



- Точная дозировка благодаря флакону-дозатору и плану дозировки.

4




- После использования и при необходимости удалить с инструментов салфеткой грубые органические загрязнения. Погрузить инструменты для очистки и дезинфекции напр. в препарат A 20. Полностью погрузить их в разобранном и раскрытом виде в раствор.

5



- Соблюдать время экспозиции производителя.

6

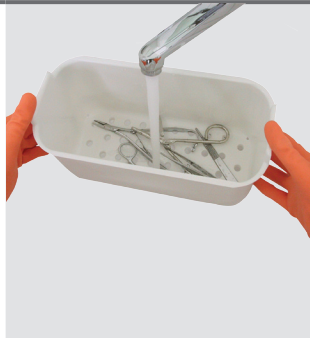

- Тщательно промыть инструменты водой и просушить. Проверить на чистоту и повреждение. При необходимости автоклавировать.

7



- При возможном остаточном загрязнении инструментов повторно очистить их щеткой. При этом этапы 4 - 6 повторить.

8



- Препарат А 20 для дезинфекции инструментов универсального использования и быстроактивный

Соблюдать: Перед обработкой инструментов необходимо каждый раз учитывать согласно RKI категории фактора риска.