

1



Соблюдать инструкцию производителя. Во время работы носить пригодные защитные перчатки.

2



Перед использованием залить в емкость аспирационного аппарата от 10 до макс. 20 мл. концентрата.

3



Дополнительно подготовить в отдельной емкости 2 %-ый готовый препарат D 10: 20 мл. концентрата из флакона-дозатора на 1 литр воды.

4



После каждого применения аппарата утилизировать катетер, аспирировать через шланг несколько мл. готового препарата D 10.

5



1 x ежедневно полностью погружать контаминированные части (емкость, шланги и т.д.) в готовый препарат D 10. (Внимание: не погружать фильтры) Соблюдать время экспозиции.

6



Отключить от сети аспирационный аппарат. Наружные поверхности аппарата обработать готовым препаратом D 10. Дать воздействовать. Альтернативно могут быть использованы дезинфицирующие салфетки V 15.

7



После окончания времени экспозиции погруженные, продезинфицированные части промыть водой. Сборка производится после полного высыхания частей, хранить в хорошо проветриваемом месте.



D 10 дезинфекция аспирационных систем
 ■ Также пригоден для ингаляционных аппаратов
 Дезинфицирующие салфетки V 15
 ■ быстроактивные - без содержания спиртов